


STRIP-ID PIPETTE DE DENUDATION ET DE MANIPULATION DES EMBRYONS (VITRIFICATION)

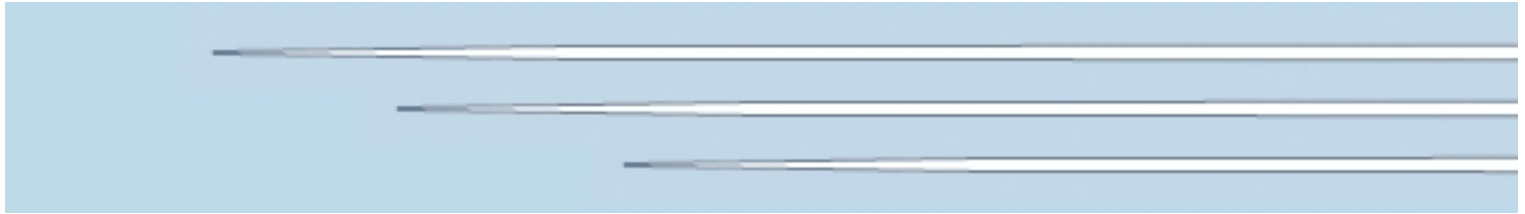

Pipette STRIP-ID pour la dénudation d'embryons et d'ovocytes

REFERENCES ET CONDITIONNEMENT

////////////////////////////////////

Pack de 10 pipettes	ID125µm	Réf. MT268
Pack de 10 pipettes	ID135µm	Réf. MT266
Pack de 10 pipettes	ID145µm	Réf. MT265
Pack de 10 pipettes	ID150µm	Réf. MT269
Pack de 10 pipettes	ID170µm	Réf. MT272
Pack de 10 pipettes	ID175µm	Réf. MT270
Pack de 10 pipettes	ID200µm	Réf. MT271

Sur commande :
ID 130µm
ID 140µm
ID 290µm

CARACTERISTIQUES

////////////////////////////////////

Qualité supérieure en polycarbonate
Flexible
Résistante
Ne raye pas les boîtes
Usage unique
Emballage unique pratique (ouverture facile)
Embryotestée
Design adapté à la majorité des portes
pipettes utilisés

STERILISATION

////////////////////////////////////

Stérilisée aux rayons gamma

CE0120

MODE D'UTILISATION

////////////////////////////////////

1. Fixer la pipette sur le porte pipette.
2. Aspirer un peu de liquide avant de manipuler pour éviter les bulles d'air.
3. Aspirer l'ovocyte dans et hors de la pipette jusqu'à ce que les cellules du cumulus soient retirées.

Les plus grand diamètres peuvent être utilisés dans les procédures de transfert et manipulation de l'ovocyte et de l'embryon...

4. Jeter le STRIP-ID après usage.